



## Guide de démarrage rapide de Checkme Lite

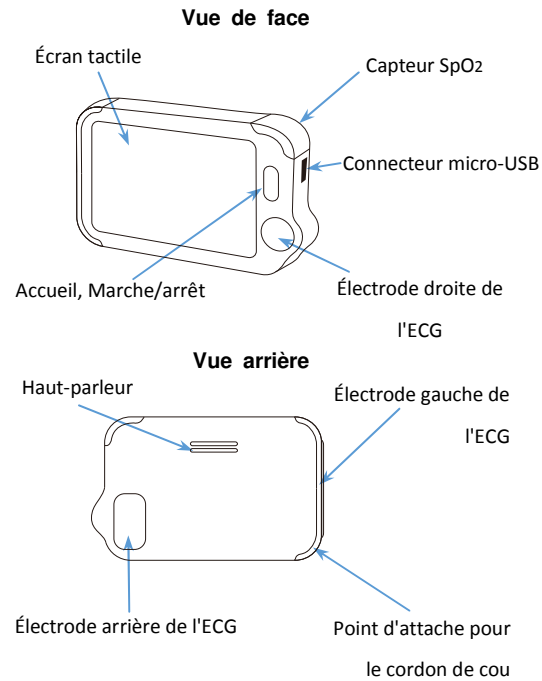

### Électrocardiographe



- 1 Appuyez sur l'icône <Enregistreur ECG>.
- 2 Sélectionnez la méthode de mesure pour l'ECG : Dérivation I ou Dérivation II (Choisissez la Dérivation II quand le signal pour la Dérivation I est faible)

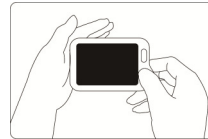

Dérivation I



Dérivation II

- 3 Suivez les instructions correspondant à la méthode que vous avez choisie.
- Appuyez le pouce de la main droite sur l'électrode de droite
  - Appuyez l'index de la main droite sur l'électrode arrière
  - Pour Dérivation I, appuyez l'électrode de gauche contre la paume de la main gauche.
  - Pour Dérivation II, appuyez l'électrode de gauche contre le genou gauche.


### Remarques :

- Humidifiez la peau (en contact avec les électrodes) si elle est trop sèche.
- Nettoyez la peau si elle est grasse.
- Posez les mains sur la table, détendez-vous, restez bien en contact avec les électrodes.

### Oxymétrie



- 1 Appuyez sur l'icône <Oxymétrie>.
- 2 Placez l'index dans le capteur comme indiqué ci-contre en restant détendu.

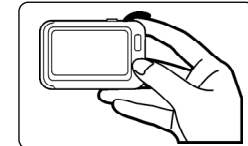

### Remarques :


- Gardez le capteur à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'exercez pas une pression trop forte sur le capteur.

### Contrôle journalier



- 1 Appuyez sur l'icône <Contrôle journalier>
- 2 Choisissez un utilisateur parmi les Utilisateurs A. B.

- 4 Index droit dans le capteur SpO<sub>2</sub>
- 3 Pouce droit sur l'électrode droite de l'ECG

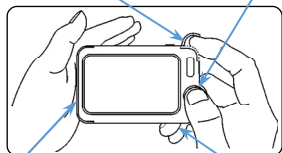

- 5 Electrode gauche de l'ECG contre la paume de la main gauche.
- 6 Majeur droit sur l'électrode arrière de l'ECG

#### Remarques :

- Les relevés de la pression artérielle (BP) ne sont disponibles qu'après un étalonnage de la BP. Veillez à sélectionner le bon utilisateur, qui doit être la personne effectuant l'étalonnage.
- Si le signal est faible avec Dérivation I, utilisez Dérivation II pour l'étalonnage comme pour les mesures du contrôle journalier.

### Étalonnage de la pression artérielle

- 1 Préparez un tensiomètre traditionnel à brassard.
- 2 Placez le brassard autour de votre bras gauche.
- 3 Réglages -> Général -> Étalonnage pression artérielle et sélectionnez le bon utilisateur.
- 4 Démarrez la mesure à l'aide du tensiomètre. Lorsqu'elle est terminée, mémorisez la valeur de la pression systolique.
- 5 Appuyez sur le bouton ► à l'écran, démarrez la mesure dans la même position que lors du contrôle journalier. Une fois la mesure terminée, saisissez la valeur de la pression systolique.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'étalonnage soit réussi.

#### Remarques :

- Gardez votre calme tout au long de l'opération.
- Veillez à sélectionner le bon utilisateur, qui doit être la personne effectuant le contrôle journalier.
- Si le signal est faible avec Dérivation I, utilisez Dérivation II pour l'étalonnage comme pour les mesures du contrôle journalier.
- Il est recommandé à chaque utilisateur d'effectuer un étalonnage de la pression artérielle tous les trois mois.

### Navigateur pour PC

- 1 Connectez l'appareil au port USB du PC à l'aide d'un
- 2 Ouvrez le logiciel pour PC « Checkme Browser (Navigateur Checkme) »
- 3 Sur l'appareil : Écran principal -> Réglages -> Vers PC
- 4 Sur le PC : Vous trouverez l'appareil dans la boîte de dialogue « Liste des Appareils » : cliquez sur le bouton de téléchargement.
- 5 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez consulter vos données ainsi que les courbes ECG, mais aussi générer un rapport et l'imprimer.

#### Remarques :

- Téléchargez le logiciel pour PC : <http://www.viatomtech.com>.