



Checkme Lite – Kurzanleitung

Vorderansicht

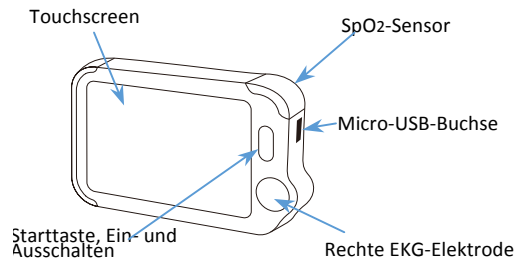


Rückseitenansicht

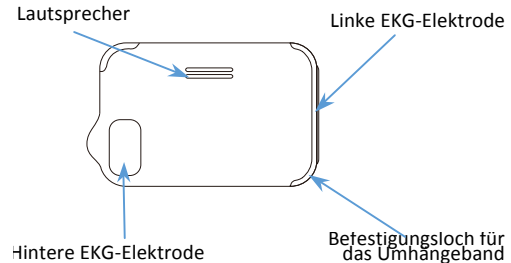

EKG-Aufzeichnung



- 1 Tippen Sie auf das Symbol „EKG-Aufzeichnung“.
- 2 Wählen Sie den EKG-Messmodus: Ableitung I oder Ableitung II (Wählen Sie Ableitung II, wenn das Signal von Ableitung I niedrig ist)

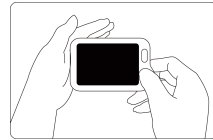

Ableitung I



Ableitung II

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen gemäß dem von Ihnen ausgewählten Modus.
 - Drücken Sie mit dem rechten Daumen auf die rechte Elektrode.
 - Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf die Elektrode auf der Rückseite.
 - Drücken Sie für Ableitung I die linke Elektrode gegen die rechte Handfläche.
 - Drücken Sie für Ableitung II die linke Elektrode gegen linke untere Bauchseite.


Hinweise:

- Befeuchten Sie die Haut (Bereich des Elektrodenkontakts), wenn sie zu trocken ist.
- Die Haut muss gereinigt werden, wenn sie fettig ist.
- Legen Sie die Hände auf den Tisch, bleiben Sie entspannt und halten Sie guten Berührungskontakt mit den Elektroden.

Pulsoxymeter



- 1 Tippen Sie auf das Symbol „Pulsoxymeter“.
- 2 Legen Sie den Zeigefinger wie abgebildet in den Sensor und halten Sie ihn ruhig.

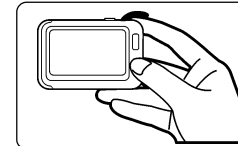

Hinweise:

- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung auf dem Sensor.
- Drücken Sie nicht kräftig auf den Sensor.

Tagesmessung




1 Tippen Sie auf das Symbol „Tagesmessung“.

2 Wählen Sie Nutzer A, B, C oder D aus.

4 Rechter Zeigefinger in den SpO₂-Sensor

3 Rechter Daumen an die rechte EKG-Elektrode

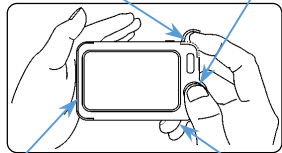

5 Linke EKG-Elektrode an linke Handfläche

6 Rechter Mittelfinger auf die rückseitige EKG-Elektrode

Hinweise:

Der BD-Wert (Blutdruck) ist nur nach der BD-Kalibrierung verfügbar. Achten Sie darauf, den richtigen Nutzer auszuwählen. Es muss derselbe Nutzer sein, der auch die Kalibrierung durchgeführt hat.

Wenn das Signal der Ableitung I niedrig ist, verwenden Sie Ableitung II sowohl für die Kalibrierung als auch die Tagesmessung.

Blutdruck-Kalibrierung

1 Bereiten Sie ein herkömmliches Blutdruckmessgerät mit Manschette vor.

2 Legen Sie die Manschette am Arm an.

3 Einstellungen -> Allgemein -> BD-Kalibrierung und Auswahl des richtigen Nutzers.

4 Starten Sie die Messung mit dem Blutdruckmessgerät. Wenn sie abgeschlossen ist, merken Sie sich den systolischen Blutdruckwert.

5 Tippen Sie auf die Taste ► auf dem Bildschirm und beginnen Sie die Messung mit derselben Anordnung wie bei der Tagesmessung. Wenn sie abgeschlossen ist, geben Sie den systolischen Blutdruckwert ein.

6 Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis gemeldet wird, dass die Kalibrierung erfolgreich war.

Hinweise:

- Bleiben Sie während des gesamten Vorgangs ruhig.
- Achten Sie darauf, den richtigen Nutzer auszuwählen. Es muss derselbe Nutzer sein, der auch die Tagesmessung durchgeführt hat.
- Wenn das Signal der Ableitung I niedrig ist, verwenden Sie Ableitung II sowohl für die Kalibrierung als auch die Tagesmessung.
- Für jeden Nutzer sollte die BD-Kalibrierung alle drei Monate neu durchgeführt werden.

PC-Desktopbrowser

1 Schließen Sie das Gerät am USB-Port des PCs

2 Öffnen Sie die PC-Software „Checkme-Browser“.

3 Auf dem Gerät: Hauptbildschirm -> Einstellungen -> Zum PC.

4 Auf dem PC: Sie finden das Gerät im Feld „Geräteliste“. Klicken Sie auf Download.

5 Nachdem der Download abgeschlossen ist, können Daten und EKG-Kurven prüfen sowie einen Bericht erstellen und drucken.

Hinweise:

- Laden Sie die PC-Software herunter: <http://www.viatomtech.com>.