


# Moniteur de signes vitaux Propaq<sup>®</sup> LT

## Carte de référence rapide

**Néonatal** — De la naissance à 28 jours, ou 44 semaines de gestation  
**Pédiatrique** — de 29 jours à 12 ans  
**Adulte** — 13 ans et plus

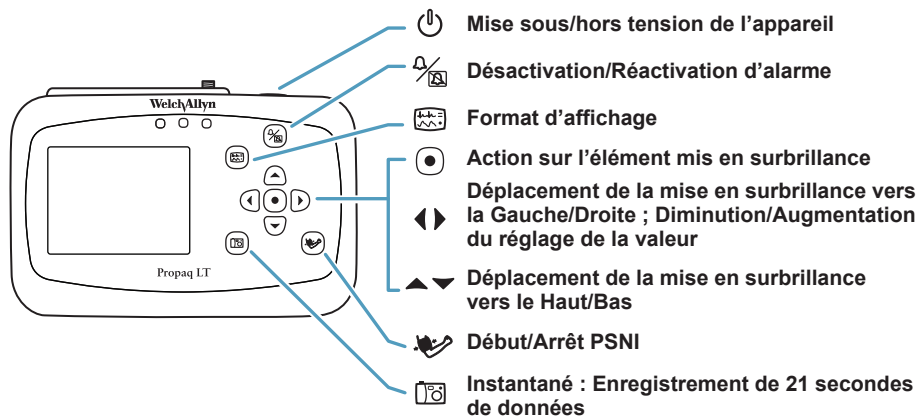

**Modifier les limites d'alarme** (sélectionner)  (sélectionner paramètre) (modifier limites)   
 (FC/FR, PSNI, SpO<sub>2</sub>, Resp) \_\_\_\_\_

**Modifier la tonalité d'alarme** **(SpO<sub>2</sub>)**  Config.  Alarm. – Ton. alarme  (sélectionner)   
 (Fble, Moyen, Élevé) \_\_\_\_\_

**Désactiver/Réactiver la tonalité d'alarme**

**Interrompre les tonalités d'alarmes** **(FC/min)**  Config.  Alarm. – Interr. alarm. son.  (sélectionner)

**Modifier les réglages (signes vitaux)** (sélectionner)  (paramètre)   
 (FC/FR, PSNI, SpO<sub>2</sub>, Resp) \_\_\_\_\_

**Modifier le mode Patient** **Adulte**  (sélectionner)   
 (Adulte, Pédiat et Néonatal) \_\_\_\_\_

**Modifier les dérivations**  II  (sélectionner)   
 (I, II, III, ...) \_\_\_\_\_

**Régler le mode PSNI** **PSNI mmHg**  Mode PSNI (sélectionner)   
 (Auto, Manuel, Turbo) \_\_\_\_\_

**Modifier la configuration du moniteur** **(PSNI)**  Config.  (sélectionner)  (régler valeurs)  
 (Alarm., ECG, PSNI, ...) \_\_\_\_\_

**Modifier l'heure/la date** **xx:xx:xx**  (sélectionner) (modifier)   
 (Heure, Minute, Mois, ...) \_\_\_\_\_

**Afficher les tendances** **(PSNI)**  Tendances

**Afficher les instantanés** **(FC/min)**  Instant.